




ISTRUZIONI PER INDOSSARE IL RESPIRATORE A FILTRO FACCIALE FILTRANTE (generali)

FFP2/FFP3 (o N95/N99)


Protezione verso chi le indossa:

Filtrano l'aria inspirata proteggendo chi le indossa; alcune tipologie filtrano anche l'aria espirata (protezione verso l'esterno);
Livelli raccomandati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità):
> FFP2 filtrano oltre il 92% delle particelle in sospensione,
> FFP3 arrivano a valori pari o superiori al 98%;
Devono aderire al volto ed essere indossate correttamente (vedere istruzioni);
Vanno indossate **prevalentemente dal personale sanitario** come da indicazione OMS

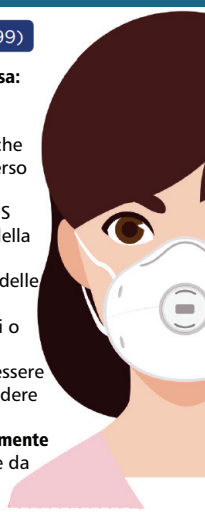


1

Sollevare estremità dei 2 lembi del respiratore e modellare lo stringinaso esercitando una leggera pressione. Tenendo il respiratore sul palmo della mano tirare il lembo inferiore per ottenere configurazione a conchiglia

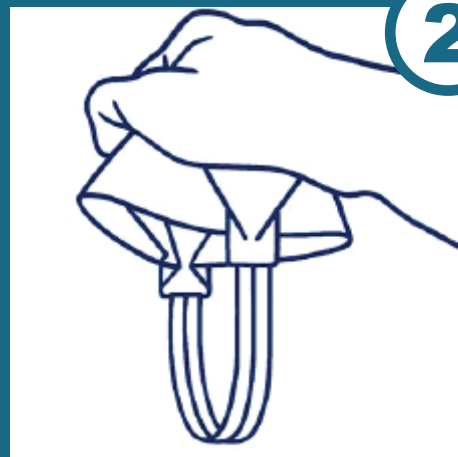

2

Capovolgere il respiratore e afferrare gli elastici

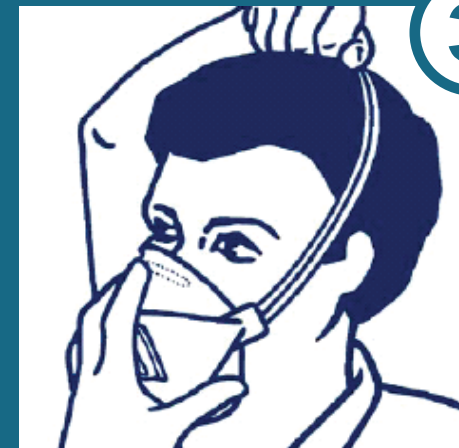


3

Appoggiare il lembo inferiore sotto il mento e sistemare gli elastici sulla testa



4

Posizionare l'elastico inferiore sotto le orecchie e quello superiore sopra le stesse. Aggiustare i 2 lembi superiore ed inferiore fino ad ottenere la tenuta ottimale

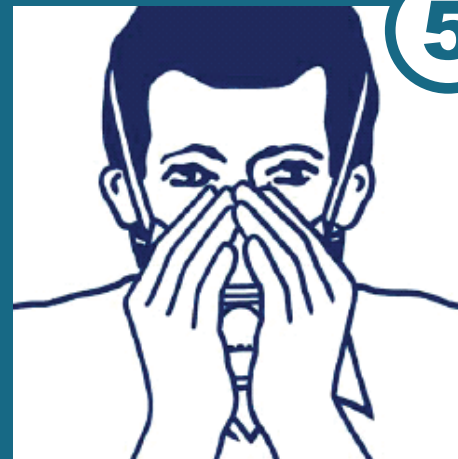

5

Modellare lo stringinaso con entrambe le mani



6

Verificare la tenuta appoggiando completamente le mani sul respiratore inspirare rapidamente. Se si dovessero avvertire problemi di tenuta, ripetere operazioni